

TESTE DE CAMPIMETRIA PERIFÉRICA MANUAL PORTÁTIL

DATA:

NOME:

CIDADE:

UF:

CPF OU RG:

SISTEMADO TESTE DE CAMPIMETRIA PORTÁTIL PERIFÉRICA NASAL E HORIZONTAL LADO DIREITO E LADO ESQUERDO

COMO APLICAR OS TESTES:

NASAL 35°: Acomode a pessoa com a testa acomodada na testeira do equipamento e peça que a pessoa olhe fixamente pelos oculares no ponto entre seus olhos, logo acima do nariz. Aperte o botão do controle correspondente ao nasal 35°, a pessoa deverá enxergar 2 pontos luminosos, em seguida peça para a pessoa fechar um dos olhos, a pessoa deverá enxergar apenas 1 ponto luminoso, proceda da mesma forma com o outro olho.

PERIFÉRICO ESQUERDO 55° 70° e 90° E DIREITO 55° 70° e 90°: Inicie os testes com o olho esquerdo e aperte o botão correspondente à 55°, depois o botão correspondente à 70° e depois o botão correspondente à 90°. Proceda da mesma forma com o olho direito. Se a pessoa testada não enxergar um dos pontos luminosos ou mais, encaminhe ao oftalmologista.

CONCLUSÕES

NASAL 35° OE SATISFATÓRIO:____ OD SATISFATÓRIO:____

PERIFÉRICO ESQUERDO 55°: SATISFATÓRIO:____ OD SATISFATÓRIO:____

PERIFÉRICO ESQUERDO 70°: SATISFATÓRIO:____ OD SATISFATÓRIO:____

PERIFÉRICO ESQUERDO 90°: SATISFATÓRIO:____ OD SATISFATÓRIO:____

PERIFÉRICO DIREITO 55°: SATISFATÓRIO:____ OD SATISFATÓRIO:____

PERIFÉRICO DIREITO 70°: SATISFATÓRIO:____ OD SATISFATÓRIO:____

PERIFÉRICO DIREITO 90°: SATISFATÓRIO:____ OD SATISFATÓRIO:____



Assinatura do trabalhador

Assinatura do examinador